

Средство увлажняющее офтальмологическое (4650 Плум), комплект в боксе: Plum Eyewash 500 мл – 2 шт., для промывания глаз при попадании инородных частиц

Артикул: 6.425



Описание

Область применения: используется при попадании в глаза инородных тел (металлической или древесной стружки, пыли, грязи).

Флаконы содержат стерильный раствор хлорида натрия (0,9%).

Продолжительность промывания: вплоть до удаления инородного тела.

Важно: струя жидкости для промывания не должна попадать в глаза под напором. На флакон надо слегка надавливать и несильно сжимать.

Упаковка стерильная, после вскрытия средство не хранить. Если упаковка не вскрыта, то препарат



Средство увлажняющее офтальмологическое (4650 Плум), комплект в боксе: Plum Eyewash 500 мл – 2 шт., для промывания глаз при попадании инородных частиц
Артикул: 6.425

[Посмотреть на сайте](#)

хранится 3,5 года.

Особенности: пыленепроницаемый настенный бокс из ударопрочного пенополистирола, снабжен наглядными инструкциями по правильному применению. Внутри крышки находится небьющееся пластиковое зеркало с эффектом увеличения изображения для удобства обнаружения посторонних частиц при близком рассмотрении.

Комплектация: 2 флакона раствора «Ай-Восс» по 500 мл.