

Средство дезинфицирующее HealthGard Di-sept (ХелтГард Ди-септ) для поверхностей, флакон с триггером 750 мл

Артикул: 12.742



Описание

Сферы применения: медицинские организации различного профиля, детские учреждения (в т.ч. образовательные), станции скорой медицинской помощи, хосписы, учреждения социального обеспечения и коммунально-бытового назначения, учреждения культуры и спорта (в т.ч. салоны красоты, тренажёрные залы и т. д.), санпропускники, предприятия общественного питания, промышленные предприятия (в т.ч. пищевые), лаборатории различного профиля, транспорт (в т.ч. транспорт дальнего следования).



Средство дезинфицирующее HealthGard Di-sept (ХелтГард Ди-септ) для поверхностей, флакон с триггером 750 мл

Артикул: 12.742

[Посмотреть на сайте](#)

Назначение: для экспресс-дезинфекции поверхностей, в том числе труднодоступных, предметов обстановки, приборов, оборудования; профилактической дезинфекции; дезинфекции (обеззараживания) обуви.

Свойства: обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза – тестировано на *Mycobacterium terrae*), в т. ч. в отношении бактерий группы кишечных палочек, стафилококков, сальмонелл, фунгицидной активностью в отношении грибов рода Кандида, Трихофитон; вирулицидной активностью в отношении возбудителей парентеральных гепатитов В, С, D, ВИЧ-инфекции, гепатита А, герпеса, гриппа (в т.ч. А/Н5N1 – «птичьего», А/Н1N1 – «свиного»), коронавируса – возбудителя «атипичной пневмонии», ротавирусов, аденовирусов, возбудителей ОРВИ, полиомиелита.

Время действия: средство обладает пролонгированным антимикробным действием в течение 4 часов.

Состав: спирт изопропиловый (пропанол-2) – 65%, спирт n-пропиловый (пропанол-1) – 5%, дидецилдиметиламмония хлорид – 0,2%.

Объем флакона с помпой: 750 мл.

Хранение: хранить средство в сухих помещениях, в местах недоступных детям, при температуре от -40 до +45 °С.

Срок годности: 5 лет со дня изготовления.

Меры предосторожности: средство огнеопасно! Не допускать контакта с открытым пламенем, включенными нагревательными приборами. Не курить во время использования! По истечении срока годности использование средства запрещается. Хранить в плотно закрытой упаковке. При случайном попадании средства в глаза, их следует обильно промыть проточной водой. При случайном попадании средства в желудок, промыть желудок большим количеством воды, вызывая рвоту.

Номер СГР: RU.77.99.88.002.E.003795.11.20

ТУ 20.20.14-001082480060-2020